

Datenblatt Bakterienfilter

Beschreibung / Einsatzort

Bakterienfilter Um eine Kontamination zu vermeiden, muss der Bakterienfilter zwischen Injektor oder Vakuumregler und Sekretauffangglas geschaltet werden. Der Bakterienfilter hat eine gute chemische Beständigkeit durch das oberflächenbehandelte Gehäuse und die Silikondichtungen.

Filtermembrane Das Filtermaterial besteht aus PTFE (Teflon®) mit einer Porengröße von 0,2 µm. Aufgrund des permanenten hydrophoben Effektes kann keine Feuchtigkeit in die Absauggeräte gelangen. Die **weiße** Filtermembrane so in das Gehäuse einlegen, das keine Falten entstehen

Desinfektion und Reinigung

Der Bakterienfilter muss vor jeder Anwendung gereinigt und bei 134 ° C autoklaviert werden.

Im Absaugbereich ist die Filtermembrane zu erneuern bzw. zu reinigen wenn der Absaugwiderstand erkennbar ansteigt, spätestens jedoch nach 3 Tagen.

Beim Einsetzen des Filters im Inhalationsbereich (Filtration trockener Gase) sollte die Filtermembrane wöchentlich erneuern bzw. gereinigt werden.

Jeder Filtereinsatz kann bis zu 10 mal autoklaviert werden.


Mit dem Stelling wird die Anzahl der Autoklavierungen pro Filtereinsatz markiert.

Hierzu wird nach dem ersten Autoklavieren der Stelling auf 1 gesetzt.

Nach jeder weiteren Autoklaviervorgang wird der Ring auf die nächst höhere Zahl gesetzt, bis bei Stellung 10 der Filtereinsatz zu tauschen ist.

Datenblatt Bakterienfilter


Bakterienfiltergehäuse kpl.
Ohne Filtermembranen
Artikel Nr.: 033-1020

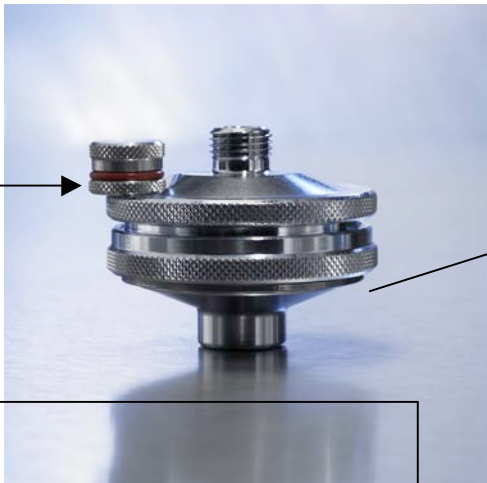


Stellring für die Anzahl der
Autoklavierungen pro Filtereinsatz

Stopfen
für Bakterienfiltergehäuse
Artikel Nr.: 033-1021

Abdeckkappe für
Bakterienfiltergehäuse
Artikel Nr.: 033-1022

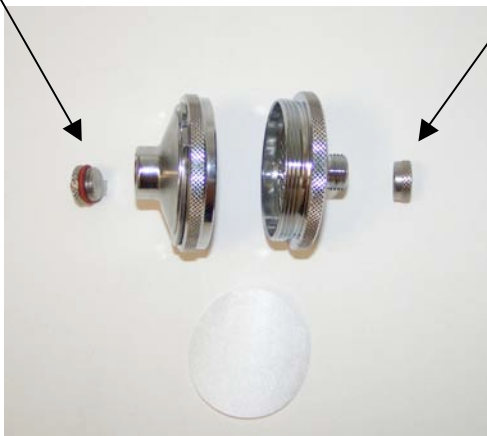

Membranfilter - Set
(1 VE = 10 Membrane)
Artikel Nr.:033-1030

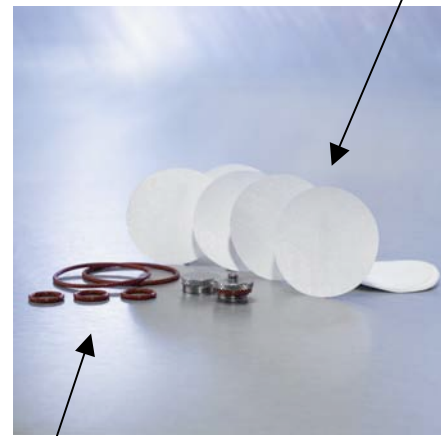

Dichtungs- Set
für Bakterienfiltergehäuse
Artikel Nr.: 033-1040

Ausführlichere Informationen über unsere Produkte finden Sie unter www.heyer-aerotech.de

Hier finden Sie auch die kpl. Gebrauchsanweisung als Download.

Oder sprechen Sie uns direkt an.

Sie erreichen uns unter Tel. 02603 / 50707-0 / Fax 02603 / 50707-67 / E-Mail office@heyler-aerotech.de